


Temadag for praksis personale, Frederik VI's Hotel d.6. Februar 2018

Mulige årsager til "skæve" parallelanalyse

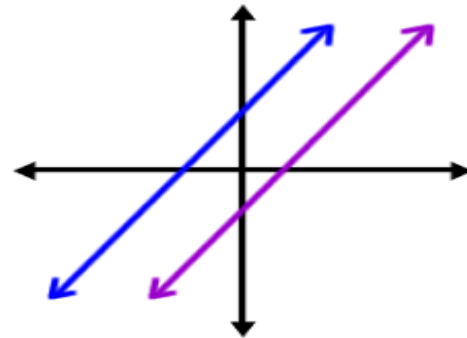

HemoCue® Hb 201 system

Overvejende årsager til “skæve” parallelanalyse:

Kapillærprøvetagningen

- Flere kuvetter fyldes fra samme dråbe
- Kuvetten fyldes forkert
(ikke helt, luftbobler, ikke på én gang, holdes forkert, direkte fra glasset)
- Kuvetterne opbevaret forkert – blege

HemoCue® Hb 201 system



Uåbnet: til udløbsdato ved
stuetemperatur
Åbnet beholder: 3 måneder ved
stuetemperatur



Til udløbsdato på pakningen ved
stuetemperatur

HemoCue® Glu 201/201 RT system

Fremgangsmåden ej korrekt:

- Kapillærprøvetagningen
- Flere kuvetter fyldes fra samme dråbe
- Kuvetten fyldes forkert
(ikke helt, luftbobler, ikke på én gang, holdes forkert, direkte fra glasset)
- Der går mere end 40 sekunder fra kuvetten fyldes til den analyseres

HemoCue® Glu 201/201 RT system

Hvis HemoCue måler højere end klinisk biokemisk afdeling

- Kuvetter opbevaret forkert/udløbet
- FC Mixture glasset ikke vendt tilstrækkeligt (lyserødt glas)
- NaF-glas indsendes
- Ikke-fastende patient (kapillær sammenlignet med vene)
- Metodeforskelle?

HemoCue® Glu 201/201 RT system

Hvis HemoCue måler lavere end klinisk biokemisk afdeling

- Venøst blod ikke analyseret umiddelbart efter prøvetagning (EDTA-glas)
- Metodeforskelle?

HemoCue® Glu 201 kuvetter



Uåbnet: til udløbsdato på køl
Åbnet beholder: 1 måned på køl
3 døgn ved stuetemperatur.



Til udløbsdato på pakningen ved
opbevaring på køl
3 døgn ved stuetemperatur

HemoCue® Glu 201 RT kuvetter



Til udløbsdato på pakningen ved stuetemperatur

HemoCue® WBC DIFF

For hver måling foretages automatisk kontrol af:

- Instrumentet
- Kuvetterne
- Blodprøven
- Håndteringen

Fejlkode ved problemer

HemoCue® WBC DIFF

Årsag til skæv parallelanalyse:

- Kapillærprøvetagningen
- Vene/kapillær ?
- Tidsforskellen mellem målingerne
- Metodeforskelle ?

HemoCue® WBC DIFF



Til udløbsdato på pakningen ved stuetemperatur

Fejlkoder: HemoCue® Hb 201, Glu 201 og Glu 201 RT

Hyppigst E01 – E05

“Fejl eller urenheder i optikken eller elektronikken”

Fjernes i langt de fleste tilfælde med Cleaner

Fejlkoder: HemoCue® WBC DIFF

E01 - E04: oftest håndteringsfejl inkl. luftbobler

E05: kuvetteholderen er skubbet ind, før “patienttest” er valgt

E30 + E60: oftest urenheder i optikken

E90: kræver oftest service