


**Inden portøren ankommer til Skt. Anne eller Fiskertorvet, skal prøverne være pakket efter følgende vejledning.**

1. Prøver til Afdeling KBF og KIA sættes fortløbende i det hvide stativ, hvis de er taget samme dag.
  - Prøver, der ikke er fyldt til markering på røret, pga. f.eks. svær prøvetagning, skal sættes i det røde stativ.
  - Prøver, der er udtaget dagen før forsendelse og centrifugerede prøver, skal sættes i det røde stativ.
  - Prøver, hvor der følger en henvisning i papir eller WebReq med bemærkninger på, skal sættes i det røde stativ.

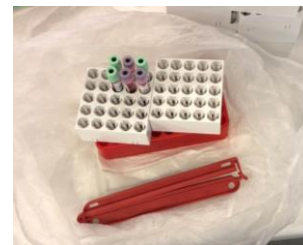

2. Der skal **altid** medsendes et rødt og 2 hvide stativer, selvom nogle er tomme. Stativerne sættes i plastposen (med sugende indlæg).

3. Eventuelle henvisninger lægges i en A4 plastlomme **henover prøverne, inden posen lukkes.**

4. Posen lukkes med plastikklemmen.



5. Posen placeres i klimaskabet.

6. Prøver til **andre** Laboratoriemedicinske afdelinger lægges i respektive adresserede forsendelseskuberter

7. Forsendelseskuberterne lægges **på de respektive hylder i skabet.**

**Husk, prøverne skal være på laboratoriet senest 6 timer efter prøvetagningen**